


使い捨て プラスチックガウン



着け方

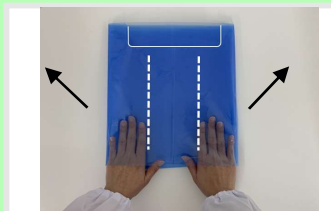

① ミシン目が上にあることを確認して両手を入れて矢印の方向に広げる



② 両腕を広げて袖に手を通す



③ 袖に空いている穴に親指を入れる



④ 首元を持って頭を通す



⑤ ミシン目に沿って腰紐をちぎる



⑥ 後ろでしっかり結ぶ

外し方



① 首元をしっかり持って左右に引っ張ってちぎる



② 表面の汚れが手につかないように脱ぐ



③ 袖から両腕を抜く




④ 下向きに巻くようにして脱いでいく



⑤ 矢印の方向へ強く引っ張り腰紐を引きちぎる



⑥ 小さく畳んで廃棄する

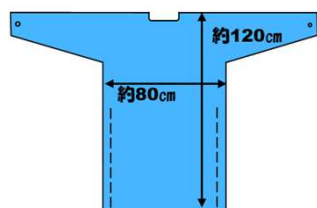

| | |
|-----|------------|
| サイズ | フリー・厚み40μ |
| 材質 | 帯電防止ポリエチレン |
| 色 | ブルー |
| 数量 | 100枚 |



着脱方法は一例です。
用途にあった方法でご使用下さい。
私たちの命を支えてくれる全ての
医療、介護従事者の皆様に感謝致します。



着脱動画はコチラから 

お問い合わせはコチラから 